

# Kasutusjuhend asap TV adapteri jaoks (angled)

-  Palun lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seda hoolikalt!
-  asap TV adaptereid tohib kasutada ainult erialase meditsiinilise personali poolt.
-  asap TV adapterid vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandarditele. Käsitsege neid alati suurima hoolikusega.
-  Mahakukkumisest või löögist tingitud mehaaniline pinge võib tuua kaasa kahjustusi või purunemise.
-  Asjatundmatu kasutamine võib tuua kaasa teie patsientide infektsioone ja vigastusi või TV adapteri kahjustuse.

## Toote kirjeldus

asap TV adapterid on optilised täppiseadmed, mis on välja töötatud endoskoopilistes rakendustes kasutamiseks. Saadaval on mitmesugused variandid. Veenduge, et teil oleks oma toote jaoks käepärast korrektne juhend.

## Tarvikud (mitte seeriaviisilised)

asap TV adaptereid saab käitada ainult koos kaamerapea, kaamera ja monitoriga.

## Sihtotstarve

asap TV adapterid võimaldavad keha sisemuse endoskoobi/multiskoobi dioptrikompensatsiooniga endoskoopilist kujutamist kaamerast monitori.

## Sihtotstarbekohane kasutamine


asap TV adapterid on kavandatud kasutamiseks koos asap endoskoopidega/multiskoopidega, samuti teiste standardse okulaarilehtriga endoskoopidega/multiskoopidega, selleks et võimaldada laiendatud visualiseerimist TV monitori abil.

## Vastunäidustused

asap TV adapterite kohta ei kehti spetsiifilisi vastunäidustusi.


## Enne kasutamist

Säilitage oma asap TV adapterit originaalpakendis. Hoiustage adapterit toatemperatuuril kuivas ja mahakukkumise eest kaitstud kohas.

-  Ärge kasutage TV adapterit, kui pakend on kahjustatud.

Kontrollige oma asap TV adapteri kasutuskölblikkust ja kas sellel esineb võimalikke kahjustusi. Siis järgige puhastus-/desinfitseerimisjuhendit.

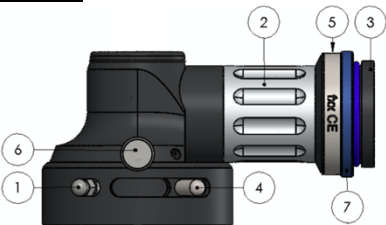

## Paigaldus



- 1) Fikseerimiskruvi
- 2) Fokuseerimise ajam, pildi teravuse seadistamine
- 3) C-kinnituse keere
- 4) Lukustamise/vabastamise tihvt
- 5) Märgistus
- 6) Fikseerimiskruvi pöörlemise jaoks
- 7) Vastumutter

Kruvige oma asap TV adapter C-kinnituse keermesse (3) kaudu kaamerapea peale. Teie asap TV adapter on varustatud fikseerimiskruviga (1). Palun pange enne igat kasutuskorda tähele seda, et fikseerimiskruvi oleks tõessti avatud (→ alumisel küljel olevad kruvi pole näha), kuna muidu saab endoskoobi okulaarilehter kahjustada. Tihvt (4) lukustab/vabastab endoskoobi vastuvõturi kuulsulguri abil. Viige endoskoop sisse


ettevaatlikult, vabastamise tihvti kinni hoides. Laske tihvt uuesti lahti ja kontrollige, kas tihvt on esialgses asendis ja kas endoskoop on õigesti fikseerunud. Pöörake nüüd ettevaatlikult fikseerimiskruvi (1), kuni endoskoop on asendisse lukustunud. Suvandina saab fikseerida pöörlemise (6). Selleks et seadistada nurka kaamera suhtes, kasutage vastumutrit (7). Pildi teravust saab seadistada fokuseerimise ajami abil (2). Seadme spetsiifilist fookuskaugust saab lugeda märgistuse (5) pealt, see määrab kujutise vaatenurga.


-  Enne kasutamist kontrollige korrektne pildindus üle.
-  Kasutage TV adapteri ümber kaitseümbrist, selleks et vältida ristsaastumisi.

## Demontaaž

Pärast rakendamist päästke kõigepealt lahti fikseerimiskruvi (1), selleks et mitte kahjustada endoskoobi okulaarilehtrit. Vajutage vabastamise tihvti (4); nüüd saab endoskoobi kergesti ära võtta. Kruvige (3) asap TV adapter kaamerapea küljest ära.

## Puhastus/desinfitseerimine

-  Mitte mingil juhul ei tohi asap TV adaptereid termiliselt puhastada ega masinaga desinfitseerida või autoklaavida. Samuti ei puhastata neid ultrahelivannis.

-  Selleks et ristsaastumist ja kahjustusi vältida, ärge transportige/puhastage/desinfitseerige oma asap TV adapterit mitte kunagi koos teiste seadmete ja instrumentidega. Neid tohib transportida/puhastada/desinfitseerida samas mahutis ainult siis, kui iga seade/instrument on individuaalselt kinnitatud ja neil pole üksteisega kokkupuudet.

1. Loputage TV adapter puhtaks otsekohe pärast kasutamist külma kraaniveega, selleks et kõrvaldada mustumised.
2. Kontrollige mustumiste eemaldamist visuaalselt. Kui määrdumine ei peaks lahti tulema, siis pikendage loputusaega või kasutage optiliste meditsiiniseadmete jaoks sobivat pühkimislappi.
3. Pange need need puhastus- ja desinfitseerimislahuse sisse. Kasutatakse erialases kaubanduses saadavalolevaid vahendeid termolabiilsete instrumentide jaoks, nt neodisher Endo® MED; 15 g/l (1,5%), 5 min (20 °C). Pidage silmas, et teie TV adapter sisaldab elokseeritud alumiiniumist osi.
4. Pühkige TV adapter puhtaks külma kraanivee all või (eelstatult) destilleeritud vee all käsna või pehme lapi abil vähemalt 1 minuti kestel. Tagage peidetud pindade loputamine (1)(2)(4)(6)(7).
5. Kontrollige visuaalselt, kas kõik jäägid on eemaldatud.
6. Kuivatage kõik osad pehme ebemetevaba lapiga. Tagage peidetud pindade kuivatamine (1)(2)(4)(6)(7).
7. Puhastage TV adapteri ülemisel ja alumisel küljel olevad optilised klaasid puhaste vatitikkude abil puhta alkoholiga. Ärge jätke alles tolmu ega plekke, mille tõttu võiks kujutis negatiivselt mõjutatud olla.

## Kontrollitavad punktid / kontrollimine

Visuaalne kontroll, kas leidub võimalikke kahjustusi, kulumisi või määrdumisi. Juhul kui see vajalik on, siis asendage seade.

## Transportimine ja hoiustamine

Transportige ja hoiustage asap TV adapterit puhtas õhukindlas ümbruskonnas toatemperatuuril.

## Piirangud kasutamisel

asap TV adapterid on valideeritud 250 uuesti taastõotlemise tsükli jaoks.

## Parandamine ja väljavahetamine

Juhul kui teil on oma asap TV adapteriga probleeme, siis võtke parandamiseks ühendust klienditeenindusega või asenduse saamiseks oma usaldusväärse edasimüüjaga. TV adapterite tagasisaatmine on lubatud ainult puhastatud/desinfitseeritud seisukorras koos kirjaliku tõendusega.

Juhul! asap soovib tungivalt mitte pöörduda parandusteeninduse tarbeks volitamata teenindusettevõtete või teenindusorganisatsioonide poole. Saatke palun kõik seadmed hoolduseks või parandamiseks tagasi ettevõttele asap.

## Kasutusest kõrvaldamine

asap TV adaptereid saab kehtivaid hügieeninõudeid arvesse võttes kasutusest kõrvaldada koos tavapäraste kliinikujäätmetega. Seejuures tuleb arvesse võtta vastavaid riigipõhiseid õigusakte ja suuniseid.


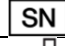











Parandamiseks kõlbmatud asap TV adapterid võib kasutusest kõrvaldamiseks puhastatud/desinfitseeritud seisukorras koos kirjaliku tõendusega ja tasuta saatkuludega pakis tootjale tagasi saata.

Muude küsimuste puhul pöörduge palun oma usaldusväärse maaletooja poole.

## Märgistus

Nimetus, seerianumber, f = fookuskaugus, soakable/leotatav (= sissepandav), UDI andmekandja ja CE-sümbol.

## Kasutatud sümbolid

Etiketi sümbol	Nimetus
	Kataloogi number
	Seerianumber
	Tootmise kuupäev
	Meditsiiniseadme nimetus
	CE-märgis, toode vastab määrusele (EL) 2017/745
	Ärge kasutage TV adapterit, kui pakend on kahjustatud
	Hoiatus
	Järgige kasutusjuhendit
	Korduvkasutatav
	Tootja
	Mittesteriilne
	Habras, käsitsege ettevaatlikult
	TÄHELEPANU: Käesoleva seadme müük või retsepti väljakirjutamine arsti poolt on allutatud USA föderaalsete piirangutele.

Igast tõsisest ohujuhtumist ühenduses seadmega tuleks teavitada tootjat ja selle riigi pädevat ametkonda, kus on kasutaja ja/või patsiendi asukoht.

Ettevõtte asap endoscopic products GmbH ei võta enda kanda mingit vastutust kahjude või hilisemate kahjude eest, mis on põhjustatud juhiste eiramise, asap TV adapterite asjatundmatu käsitsemise või kasutamise tõttu.



**asap endoscopic products GmbH**  
**Stöckmatten 19**  
**79224 Umkirch – Saksamaa**  
**Tel: +49 (0)7665 / 94 773-0**  
**E-post: info@asap-gmbh.de**

